

気泡警報が解除されない時の対応方法


プライミングを行っても気泡警報状態が解除されない場合は、以下の手順を行ってください。

1. ドライブユニットからエイミーMPユニットを取り外します。
2. エイミーMPユニット上流側チューブ（下図で黄色く示す部分）を指ではじいて、気泡をチューブ先端に移動させます。

<気泡を検出している状態>



<気泡がチューブ先端へ移動した状態>

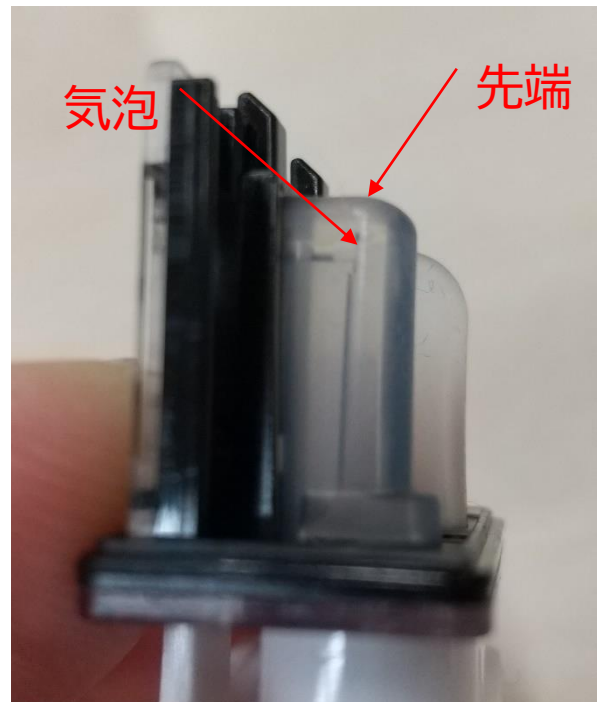

3. ドライブユニットにエイミーMPユニットを挿入し、[リリース]スイッチをロックします。
4. プライミングを行い、気泡警報が解除されることを確認してください。

製造販売業者

 大研医器株式会社
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

2301C <社内管理番号：08604570-J00>