



# COOPDECH

## クーデック® ダブルルーメン気管支チューブ

右用

- 留置域を広く確保した波形の「WAVEカフ」。
- 開口部が塞がれにくいチューブ構造。
- 歯牙との接触防止のためパイロットバルーンチューブの位置を工夫。
- X線不透過ラインによる位置確認が可能。

管理医療機器

一般名称：換気用気管支チューブ

医療機器承認番号：21600BZZ00541000

販売名：ダブルルーメン気管内チューブ

 大研医器株式会社




# 困難とされる右主気管支への留置を容易に — 右主気管支長の短い症例にも対応しました —

## カフ留置域を拡大した「WAVEカフ」

気管支カフに、波型の「WAVEカフ」を採用。留置可能範囲が広く、カフの一部が気管内に突出していても左右肺の分離が維持できます。

- カフを細長くすることで、留置可能な範囲が広くなりました。
- 気管支カフにくびれを設け、浅い留置位置でも左肺への経路を塞ぎにくくしました。

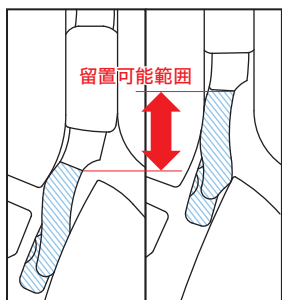

## 開口部が塞がれにくいチューブ構造

- 右上葉気管支を塞がないように、側孔を2つ空けました。
- 気管カフ-気管支カフ間を短縮したため気管ルーメン開口部が気管分岐部の近くに位置しやすく、気管壁で塞がれにくくなっています。



## パイロットバルーンチューブ

歯牙との接触による損傷を防止するため、パイロットバルーンチューブができるだけ本体チューブの後端から分岐するようにしました。

## X線不透過ライン

チューブ先端・側孔・気管ルーメン開口の3箇所に造影マーキングを施しているため、X線透視によりチューブの位置を確認できます。

品番	サイズ (Fr)	入数	希望小売価格 (税別)
CDT-R32F-C	32	1セット	28,600円
CDT-R35F-C	35	1セット	26,000円
CDT-R37F-C	37	1セット	26,000円
CDT-R39F-C	39	1セット	26,000円

1セット/箱 滅菌済

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

COOPDECH、クーデックは大研医器株式会社の登録商標です。



### 〈セット内容〉

- ダブルルーメン気管支チューブ ×1
- スタイレット ×1
- サクシジョンポート ×2
- カーレンスアダプター ×1
- サクシジョンカテーテル (10Fr) ×2

販売業者



**大研医器株式会社**  
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

本社 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2 TEL 0725-30-3150  
 〈製品に関するお問い合わせは、下記営業窓口にご連絡ください〉  
 札幌支店 〒001-0010 札幌市北区北十条西4-1-19 楠本第10ビル7F TEL 011-708-3060  
 仙台支店 〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-3-7 K2小田急ビル6F TEL 022-214-4561  
 さいたま支店 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-1 YK-10ビル7F TEL 048-650-9925  
 東京支店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル7F TEL 03-5835-5011  
 横浜支店 〒220-0004 横浜市西区北幸2-9-40 銀洋ビル5F TEL 045-872-0700  
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-19-24 名古屋第一ビル7F TEL 052-559-1286  
 金沢営業所 〒920-8203 金沢市鞍月5-181 AUBE 4F TEL 076-238-9950  
 大阪支店 〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-6 ODC天満橋ビル7F TEL 06-6943-1161  
 広島支店 〒732-0827 広島市南区福荷町5-18 三共福荷町ビル2F TEL 082-568-2377  
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-10-15 博多駅東アトルビル5F TEL 092-481-1751

COOPDECHの製品情報はホームページをご覧ください→ <http://www.daiken-iki.co.jp/>

製造販売業者



**クリエートメディック株式会社**

〒210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-6

代理店



この印刷物は、環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。

2024.5

カタログ記載内容2024年5月現在  
(2405B)