




COOPDECH

クーデック® ブレスウォーム

- 吸湿発熱繊維（アクリレート系繊維）を配合し保温性を高めた不織布オイフです。
- 吸湿発熱繊維は水分を吸湿すると発熱する高機能繊維です。
- 患者に優しく、覆いやすいように柔らかく仕上げました。

一般医療機器
一般的名称：単回使用汎用サージカルドレープ
医療機器届出番号：27B1X00013000004
販売名：クーデックブレスウォーム

 大研医器株式会社

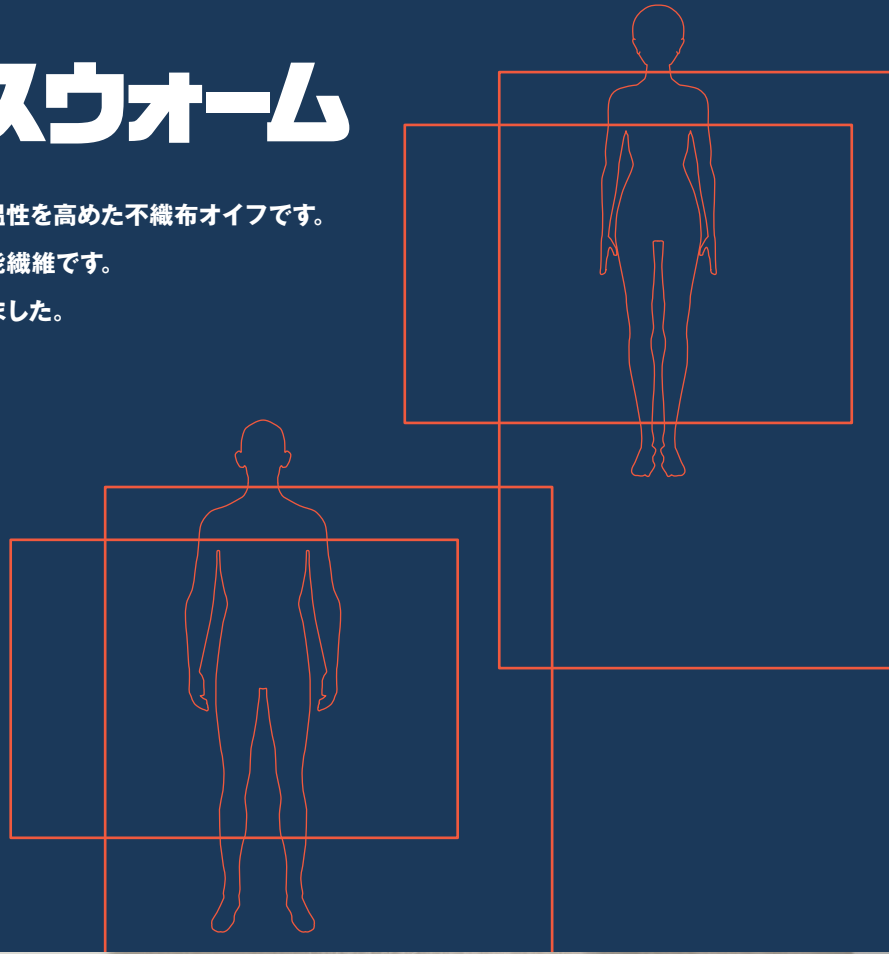

COOPDECH BREATH WARM

COOPDECH BREATH WARM

吸湿発熱繊維を配合し、 保温性を高めた不織布オリーブです。

■吸湿発熱繊維


吸湿発熱繊維は人体の水分を吸湿すると吸着熱により発熱する高機能繊維です。
クーデックブレスウォームは吸湿発熱繊維を60%配合しました。

■優しく柔らかな風合い

患者に優しく、覆いやすいように柔らかく仕上げました。

■サイズは2種類

全身を余裕を持って覆えるWサイズとレギュラータイプのRサイズをラインアップしました。
術式などに応じて選択できます。

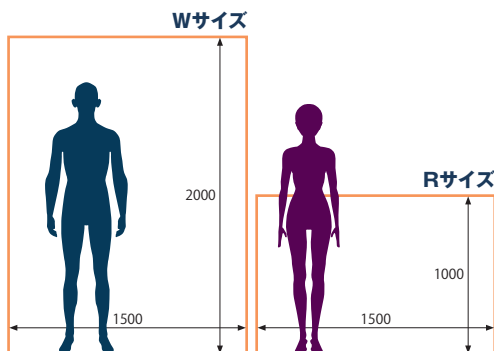



<使用上の注意>

1. 本製品はディスプレイ製品です。
2. 使用上差し支えのある汚れや異物及び破損がないことを確認し、異常を認めた場合は使用しないでください。
3. 本製品は非滅菌製品のため、手術野等清潔性を必要とする部位には使用しないでください。
4. 使用中は常に患者の体温を測定してください。
5. 使用中に患者の高体温又は低体温を含む異常を認めた時は直ちに使用を中止し適切な処置を行ってください。
6. 本製品を強く引っ張らないでください。
7. 本製品は滅菌使用を意図していません。
8. 本製品は吸湿発熱繊維の特性により色合いや風合いに多少のばらつきがありますが、使用上の問題はありません。



<材質>

指定外繊維(アクリレート系繊維): 60%
ポリエステル: 40%

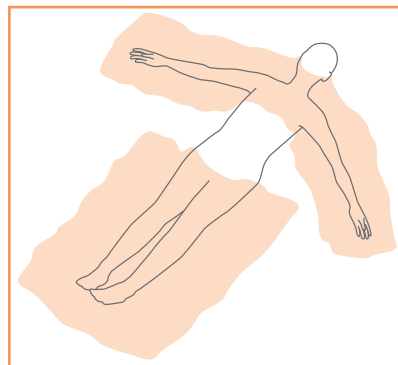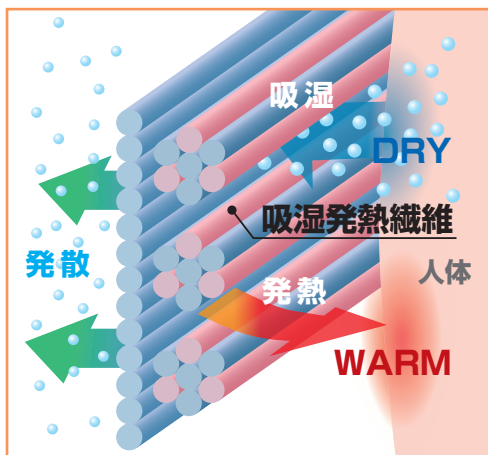

<使用方法>

1. 包装を丁寧に開封し、本製品を取り出してください。
2. 患者身体の適切な部位を覆ってください。
 - 手術入室直後からご使用いただけます。
 - 患者の露出面積が少なくなるよう広い範囲を覆ってください。
 - オリーブの中に室内の空気が入り込まないよう、しっかり覆ってください。

クーデックブレスウォーム ●仕様

品番	品名	サイズ		入数	希望小売価格(税別)
		縦(mm)	横(mm)		
CBW-A1520N	クーデックブレスウォームWサイズ	2000	1500	10	35,000円
CBW-A1510N	クーデックブレスウォームRサイズ	1000	1500	20	38,000円

- 記載の希望小売価格には、消費税は含まれておりません。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
- 使用前に添付文書をお読みください。

製造販売業者

 **大研医器株式会社**
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

本社 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2 TEL 0725-30-3150
 (製品に関するお問い合わせは、下記営業窓口にご連絡ください)
 札幌支店 〒001-0010 札幌市北区北十条西4-1-19 楠本第10ビル7F TEL 011-708-3060
 仙台支店 〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-3-7 K2小田急ビル6F TEL 022-214-4561
 さいたま支店 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-1 YK-10ビル7F TEL 048-650-9925
 東京支店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田掘商ビル7F TEL 03-5835-5011
 横浜支店 〒220-0004 横浜市西区北幸2-9-40 銀洋ビル5F TEL 045-872-0700
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-19-24 名古屋第一ビル7F TEL 052-559-1286
 金沢営業所 〒920-8203 金沢市鞍月5-181 AUBE 4F TEL 076-238-9950
 大阪支店 〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-6 レナ天満橋ビル7F TEL 06-6943-1161
 広島支店 〒732-0827 広島市南区福荷町5-18 三共福荷町ビル2F TEL 082-568-2377
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前3-10-15 博多駅前アトルビル5F TEL 092-481-1751
 COOPDECHの製品情報はホームページでご覧いただけます→ <http://www.daiken-iki.co.jp/>

代理店



この印刷物は、環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。

2019.8

カタログ記載内容2019年8月現在
(1908B)