

品 番	品 名	凝固剤	フローストッパー	入 数
DKI-TF3020P	バッグタイプ一体型2Lブレ	○		5本×10袋
DKI-TF3020F	バッグタイプ一体型2Lファイナル	○	○	5本×10袋
DKI-TF4020P	バッグタイプ排出型2Lブレ			5本×10袋
DKI-TF4020F	バッグタイプ排出型2Lファイナル		○	5本×10袋
DKI-TF3035P	バッグタイプ一体型3.5Lブレ	○		5本×10袋
DKI-TF3035F	バッグタイプ一体型3.5Lファイナル	○	○	5本×10袋
DKI-TF4035P	バッグタイプ排出型3.5Lブレ			10本× 5袋
DKI-TF4035F	バッグタイプ排出型3.5Lファイナル		○	5本×10袋

品 番	品 名	入 数	備 考
DKI-TF5020	凝固剤ユニット2L	50個	バッグタイプ排出型2L専用
DKI-TF5035	凝固剤ユニット3.5L	50個	バッグタイプ排出型3.5L専用
DKI-RD920	排液凝固剤	30本	1本あたり220g入り
DKI-RD841	フローストッパー	30個	配管保護用

品 番	品 名	入 数	備 考
DKI-FF707 (H・L)	FFキャスターセットバッグ用 (H・L)	1セット	キャスター単体 (H・L) + キャニスター2Lブレ (3個) + キャニスター2Lファイナル (1個)
DKI-FF708H	FFキャスターセット3.5L用H	1セット	キャスター単体 (H) + キャニスター3.5L (2個)
DKI-FF767K	FF2Lバッグ壁掛けセット	1セット	RG-300+キャニスター2L+キャニスター用フック+配管アダプター／川重・ユニ式
DKI-FF767A	FF2Lバッグ壁掛けセット	1セット	RG-300+キャニスター2L+キャニスター用フック+配管アダプター／アムコ式
DKI-RD730P	キャニスター2Lブレ	1個	バッグタイプ2Lブレ用
DKI-RD730F	キャニスター2Lファイナル	1個	バッグタイプ2Lファイナル用
DKI-FF7303	キャニスター3.5L	1個	バッグタイプ3.5L (ブレ・ファイナル) 用
DKI-RD792	キャニスター用フック	1個	壁掛け用
RG-300	フィットフィックスレギュレータ	1台	
RD-822KC	配管アダプター	1個	ピン式
RD-822A	配管アダプター	1個	シュレーダ式
DKI-RD886	三方活栓	1個	吸引切替用
DKI-RD890	ボール弁付きニッブル	1個	開閉バルブ
DKI-FF704 (H・L)	FFキャスター単体 (H・L)	1台	高・低／ボトル・バッグ兼用
DKI-FF794K	FFキャスター架台セット	1セット	レギュレータ架台+シリコンチューブ (50cm) + 配管アダプター／ピン式
DKI-FF794A	FFキャスター架台セット	1セット	レギュレータ架台+シリコンチューブ (50cm) + 配管アダプター／シュレーダ式

- ご注文はケース・セット単位でお願いします。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
- 記載の希望小売価格には、消費税は含まれておりません。
- ご使用前には必ず、取扱説明書・添付文書をお読みください。
- クーデック、COOPDECH、フィットフィックス、FITFIXは大研医器株式会社の登録商標です。



COOPDECH

フィットフィックス® 2.0L/3.5L

- フィットフィックスは凝固剤一体型の密閉方式。
吸引終了後に、フタを開けることなく指一本で排液を凝固。焼却処理が可能です。
- 容器内に溜まった排液は、血液濃度、量ともに千差万別。
凝固剤の偏りや凝固不十分を避けるため、独自の凝固剤と投入方法を開発。
- ベーシックな排出型に、必要に応じて凝固剤を取り付ければ、凝固剤一体型として凝固・廃棄が可能。
臨機応変に利用できます。
- 収納・廃棄にコンパクトなバッグタイプ。
- 梱包状態も省スペース化。
- 配管への吸い込み事故防止のため、液体を吸収すると一瞬で膨潤し、
吸引をストップするフローストッパーを採用。(ファイナルタイプのみ)

一般医療機器 特定保守管理医療機器
一般的名称：真空吸引器
医療機器届出番号：27B1X00013000001
販売名：フィットフィックス

大研医器株式会社

《使用前の準備操作》



バッグをしっかりとのばします。



ライナーをセットして、インレットエルボ (赤) をキャニスターの接続口に接続します。



ライナーのインレットに患者側の吸引チューブを接続して、吸引を行います。

《使用後の処理操作》



吸引が終わったら、それぞれのインレットエルボをインレットに接続して、内部を密閉します。



プランジャーを90度回転させ下まで押し込み、凝固剤を投入します。



内部が凝固していることを必ず確認してから、バッグを取り出します。

製造販売業者

大研医器株式会社
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2

本社 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2 TEL 0725-30-3150
 《製品に関するお問い合わせは、下記営業窓口にご連絡ください》
 札幌支店 〒001-0010 札幌市北区北十条西4-1-19 楠本第10ビル7F TEL 011-708-3060
 仙台支店 〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-3-7 K2小田急ビル6F TEL 022-214-4561
 さいたま支店 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-1 YK-10ビル7F TEL 048-650-9925
 東京支店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル7F TEL 03-5835-5011
 横浜支店 〒220-0004 横浜西区北幸2-9-40 銀洋ビル5F TEL 045-872-0700
 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-19-24 名古屋第一ビル7F TEL 052-559-1286
 金沢営業所 〒920-8203 金沢市鞍月5-181 AUBE 4F TEL 076-238-9950
 大阪支店 〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-6 レナ天満橋ビル7F TEL 06-6943-1161
 広島支店 〒732-0827 広島市南区福荷町5-18 三共福荷町ビル2F TEL 082-568-2377
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-10-15 博多駅東アトルビル5F TEL 092-481-1751
 COOPDECHの製品情報はホームページでご覧いただけます→ <http://www.daiken-iki.co.jp/>

代理店



この印刷物は、環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。

2023.2

カタログ記載内容2023年2月現在 (2302B)



Disposable Suction Bag

FFfix

セーフティー& インフュージョンコントロール。 医療用吸引器の新スタンダードです。



収納・廃棄がよりコンパクトに

小さくたためるバッグタイプなので、梱包状態（50個入り箱寸法は、排出型で715mm×285mm×330mm、一体型で770mm×310mm×570mm）から廃棄処分までずっとコンパクトです。



計算された凝固能力

ベーシックな排出型も、予め凝固剤ユニットをセットしておけば、吸引終了後に排液を大気にさらすことなく、指一本で凝固可能。また、貯溜した排液は、血液濃度、量とも千差万別。凝固剤の偏りや凝固不足をなくすため、専用にチューニングされた凝固剤と、理想的な凝固剤の落下を実現しました。




フローストッパー

配管への吸い込み事故を防止するため、ファイナルには液体を吸収すると一瞬で膨潤し、吸引をストップするフローストッパーが備わっています。



逆止弁内蔵

インレットの内部には、急な排液の飛び出しを防ぐ逆止弁を内蔵しています。

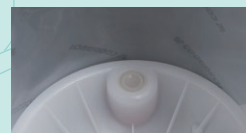

2L-BAG




- ①バッグタイプ排出型 2L ブレ [DKI-TF4020P]
- ②バッグタイプー体型 2L ブレ [DKI-TF3020P]
- ③バッグタイプ排出型 2L ファイナル [DKI-TF4020F]
- ④バッグタイプー体型 2L ファイナル [DKI-TF3020F]
- ⑤凝固剤ユニット 2L [DKI-TF5020]

3.5L-BAG




- ⑥バッグタイプ排出型 3.5L ブレ [DKI-TF4035P]
- ⑦バッグタイプー体型 3.5L ブレ [DKI-TF3035P]
- ⑧バッグタイプ排出型 3.5L ファイナル [DKI-TF4035F]
- ⑨バッグタイプー体型 3.5L ファイナル [DKI-TF3035F]
- ⑩凝固剤ユニット 3.5L [DKI-TF5035]

WALL-MOUNTED SET

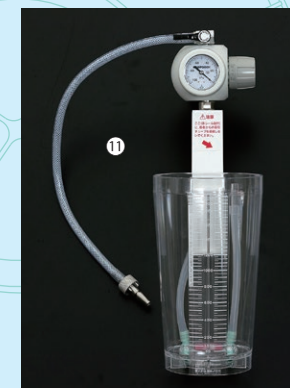

- ⑪FF 2L バッグ壁掛けセット [DKI-FF767K (A)]

2L-CANISTER

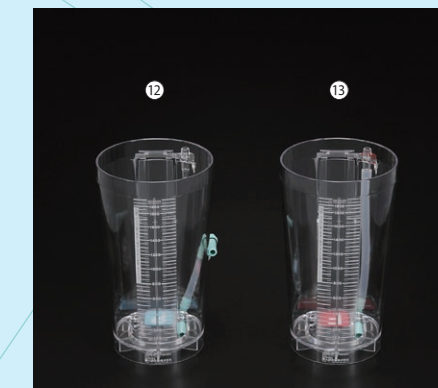

- ⑫キャニスター 2L ブレ [DKI-RD730P]
- ⑬キャニスター 2L ファイナル [DKI-RD730F]

3.5L-CANISTER



- ⑭キャニスター 3.5L [DKI-FF7303]

CASTER



- ⑮FF キャスター単体 (H) [DKI-FF704H]
- ⑯FF キャスター単体 (L) [DKI-FF704L]

CASTER SET




- ⑰FF キャスターセットバッグ用 (H) [DKI-FF707H]
- ⑱FF キャスターセットバッグ用 (L) [DKI-FF707L]
- ⑲FF キャスターセット 3.5L 用 (H) [DKI-FF708H]

REGULATOR



- ⑳フィットフィックスレギュレータ [RG-300]

ACCESSORY

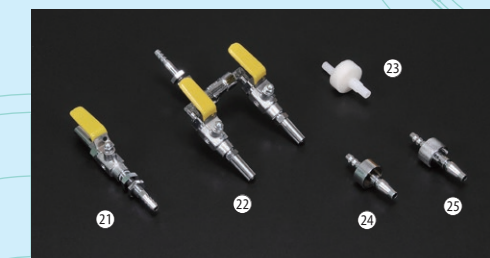


- ㉑ボール弁付きニップル [DKI-RD890]
- ㉒三方活栓 [DKI-RD886]
- ㉓フローストッパー [DKI-RD841]
- ㉔配管アダプター [RD822A]
- ㉕配管アダプター [RD822KC]



- ㉖排液凝固剤 [DKI-RD920]



- ㉗FF キャスター架台セット [DKI-FF794K (A)]

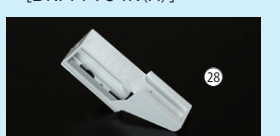

- ㉘キャニスター用フック [DKI-RD792]